

DekoRen+ Enzym

Produkttype/ Bruksområde

Enzymbasert, nøytralt og flytende rengjøringsmiddel for skånsom rengjøring av sensitivt medisinsk utstyr og instrumenter. Kun til profesjonelt bruk.

Maskinoppvaskmiddel for instrumentvaskere, ultralydbad og manuell vask.

Bruksanvisning

Produktet doseres vanligvis gjennom maskinens doseringsanlegg. Anbefalt dosering er 2-6 g/liter avhengig av dekontaminatortype. Doseres ved 25 °C. Anbefalt vasketemperatur er 45 °C.

Enzymens effekt avtar over 55 °C. Vasketemperatur skal ikke overstige dette.

Produktet kan benyttes til manuell vask, i ultralydbad og til bløtlegging. Dosering: 3 - 5 m/L avhengig av tilsmussingsgrad (ca. 0,5 dl per 10 l vann). Anbefalt temperatur: 45 °C i ca. 10 minutter. Ved manuell rengjøring anbefales Lilleborg doseringspumpe.

Egenskaper

pH: 7,5 (ufortynnet)

Spes. vekt: ca. 1,13 kg/l.

Rustfritt stål, kobber, messing og aluminium påvirkes ikke.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres i originalemballasjen ved frostfri lagring. Bør ikke lagres ved temperaturer over 40 °C. Holdbar 2 år etter produksjonsdato.

Miljøråd

- Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjøring.
- Unngå over- eller underdosering.
- Følg anbefalt temperatur for hygienisk rengjøring og desinfeksjon.
- Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje (Grønt punkt symbol).

